

Go Talk now

ist eine symbolbasierte App für UK zum individuellen Anlegen und Gestalten von Kommunikationsbüchern.



Videoanleitung + Tipps
Handbuch



Einstellungen in der App:

- Navigation durch Wischen (Pfeile werden nicht benötigt);
- Sperrmodus verhindern (während App im Betrieb ist)
- 1 Taster automatisch ein (bei Bedienung mit Einfach-taster)
- 1 Taster automatisch aus (bei Bedienung mit Zweifach-taster)
- Video Buttons: - Alternative Ansicht (Video wechselt auf ganzen Bildschirm beim Abspielen) – Video schneiden
- Url – Buttons: optional URL – Links zur Verfügung stellen
- Quiz Support – für Quizseiten (würfelt Buttons wieder durcheinander)



Sichern optional über **Computer**, Drop box oder Google Drive
mechPad mit Computer verbinden – iTunes am Computer öffnen-
Gerät auswählen – Go talk now – speichern.

Kommunikationsbücher bearbeiten, oder erstellen

Auf Startseite auf Buchtitel (unten Mitte) tippen-



Duplizieren (um das Original zu behalten).


Teilen über Air Drop (mechPads müssen im gleichen Raum sein und Air Drop ein) – komprimiertes Buch teilen - Air Drop – Name auswählen.

Teilen in PDF exportieren – man erhält per email einen Link zum Download

Teilen über email (komprimiertes Buch teilen – mail- die Dateigröße kann ein Problem dabei darstellen)



Das ausgewählte Kommunikationsbuch
öffnet sich.

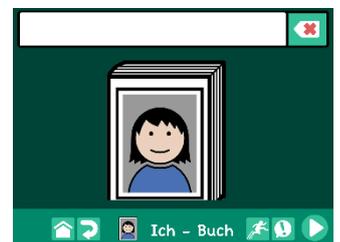

Startseite

(lange drücken, oder mit 3 Finger vom Seitenrand oben nach unten wischen-dafür in App
Einstellungen: „Disable Three Finger Swipe“ aus)



Rückgängig



Ich - Buch Seitenname



Gehe zu



Kernvokabular



Umblättern



Bearbeitungsmodus



Zurück zur Startseite

(im Bearbeitungsmodus orange hinterlegt; kurz drücken)



Einstellungen

Hintergrundfarbe

Raster optional: 1,2,4,9,16,25,36

Automatisch aktivieren (bei nur 1 Button – gleich beim Aufblättern der Seite)

Seite aktiviert: (wird nur dann im Buch angezeigt)

Expressseite: Nachrichtenfenster ¹

Auditive Hinweise: ab 4 oder mehr Buttons –

(Zeilen oder Spalten können mit sprachlichen Hinweisen z.B. für blinde Menschen aktiviert werden)



Ich – Buch Motiv kann zu Seitenname hinzugefügt werden



Seiten + Vorlagen organisieren (gleiche Funktion bei  auf der letzten Seite)

- Tastaturseite hinzufügen ²
- Mit Seitenassistenten können rasch neue Seiten angelegt werden (Wenn kein Bild als Vorlage gespeichert ist – steht nur der Name im Button)
- Schriften auswählen (*Schulschrift* kann über die App AnyFont importiert werden)
- Man kann mehr als 1 Bild hinzufügen: Doppeltippen auf das Bild, so kann es verändert werden (in Camera Roll speichern = mechPad Fotos)
- Mit Aktionen: Aufnahme, gehe zu Seite, Video oder URL öffnet Weside
- Man kann auch „nach Aktion“ „gehe zu“ wählen (Beispiel ein Video wird abgespielt und danach blättert es auf verlinkte Seite)
- Auditive Hinweise kommen bei anderer Aufnahme beim 2x Tippen
- Um Seiten im Buch zu verwalten- andere Seite aufschlagen - bearbeiten – löschen oder reihen 
- Szenenseiten (Hintergrundbild mit frei platzierbaren Hotspots)
Bild verankern verhindert das Verschieben des Bildes 
-  Buttons auf Szenenseite hervorheben
-  Hybrid: Buttons optional links, rechts, oben oder unten

¹ Expressseite: Wenn Expressseite aktiviert ist, in App Einstellungen „Zusammenziehen von Sätzen“ 3 sec auf Nachrichtenfenster speichert Satz als Bild, oder zum Versenden in email – (auch Symbole)

² Tastaturseite: In App Einstellungen „Kombinieren von Wortfragmenten“ ein

- **Seitenvorlagen erstellen**

Vorlagen können bis zu 10 Seiten enthalten + zu Kommunikationsbüchern hinzugefügt werden. Gestaltet von Attainment: Seitenvorlage von Mitarbeiter zur Darstellung möglicher interaktiver Eigenschaften.

- **Öffentliche Galerie**

Sobald hochgeladen, kann das Buch nicht mehr verändert oder gelöscht werden

- **Private Galerie**

Können mit Link + Code versendet werden. Sie werden nicht mit Namen sondern mit Code gespeichert.

Herunterladen 

Store: kostenpflichtige (Bibliotheken, zusätzliche Stimmen)